

Checkliste Einweisung Fachkreise

t:slim X2™ Insulinpumpe mit Control-IQ™ Technologie

Softwareversion

Die t:slim X2 Insulinpumpe verstehen und einsetzen

Pumpe an Stromquelle zum Start anschließen

- Spracheinstellung
- START anwählen

Bedienung des Touchscreens und allgemeine Navigation

- Startbildschirm und Home-,T“-Taste
- Vorstellung der Symbole auf dem Touchscreen

Geräteeinstellungen

- Anzeigeneinstellungen: Bildschirm-Auszeit, Sprache
- Bluetooth® Einstellungen
- Uhrzeit und Datum
- Lautstärke (CGM und Pumpe)
- Sicherheits-PIN

Verlauf

- Pumpenverlauf: Insulinabgabe, Gesamt Tagesdosis, Bolus, Basal, Reservoirwechsel, BZ-Wert, Warnungen und Alarmer, Control-IQ, Gesamt
- CGM-Verlauf: Sitzungen und Kalibrierungen, Warnungen und Fehler, Gesamt

Optionen

- Mein CGM (ggf. Dexcom-Empfänger abschalten)
- Dexcom G6 Verbindung (Transmitter ID, Sensorcode)
- Dexcom G7 Verbindung (Kopplungscode)
- CGM-Warnungen mit Bereichswarnung

Meine Pumpe

- **Control-IQ:** an/aus
- Gewicht Eingabe
- Insulin-Tagesdosis-Eingabe
- Pumpenerinnerungen: BZ niedrig, BZ hoch, BZ nach Bolus, Mahlzeiten-Bolus versäumt
- Pumpenwarnungen: niedriges Insulin, Auto-Abschaltung (Standard: AUS)
- Pumpeninformationen: Seriennummer, Kundendienst

Persönliche Profile

Pumpeneinstellungen

- Sofortbolus: Gramm oder Insulineinheiten, Gramm/Einheiten-Erhöhen
- Max. Bolus: maximal 25 E
- Basal-Grenze: min. 0,2 E/h max. 15 E/h

Profil

- Zeitsegmente: Basalrate, Korrekturfaktor, KH-Faktor, Ziel-BZ
- Boluseinstellungen: Insulindauer, KH ein/aus
- Persönliches Profil bearbeiten (überprüfen), ändern, aktivieren, kopieren, löschen, umbenennen

Aktivität

- Bewegung: aktivieren/deaktivieren
- Timer einstellen
- Schlaf: aktivieren/deaktivieren
- Wechsel der Aktivitäten
- Schlafenszeiten: zwei Profile einstellbar
- Temporäre Basalrate einstellen und abbrechen

Füllen: Reservoir laden und Infusionsset

- Reservoir befüllen und wechseln
- Schlauch und Kanüle füllen, Erinnerung: Kanülenwechsel
- Infusionsset setzen und wechseln
- Infusionssets: Unterschiede und Handhabung
- Zugelassene Insuline: U-100 Insulin Humalog, NovoRapid, Admelog/Insulin lispro Sanofi®
- Haltbarkeit des Insulins: NovoRapid, Humalog, Admelog/Insulin lispro Sanofi®

Bolus

- Mahlzeitenbolus: Eingabe Gramm Kohlenhydrate oder Insulineinheiten Berechnung anzeigen lassen, Bolus abbrechen
- BZ-Wert eingeben
- Verlängerter Bolus: einstellen und abbrechen
- Kombierter Bolus: einstellen und abbrechen
- Sofortbolus
- Bolusrechner mit und ohne aktivem Insulin

Allgemeines

- Tragemöglichkeiten
- Wasserbeständigkeit
- Hotline und Bestellungen

Unterschrift geschulte Person

Ich bestätige, dass ich in den obigen Punkten geschult wurde und den Verwendungszweck sowie sicheren Gebrauch uneingeschränkt verstanden habe.

Geschulte Person

✗

Unterschrift

Datum

Unterschrift zertifizierter Pumpentrainer

Ich bestätige hiermit, dass ich zu den obigen Punkten eine Schulung durchgeführt und die Einzelheiten genau dokumentiert habe.

Zertifizierter Pumpentrainer

✗

Unterschrift

Datum