


Neue Funktionen der Software-Version 7.7 (mg/dl und mmol/l)

Flexibel den CGM-Sensor wählen: Dexcom G7 und G6

Patient*innen können sich frei entscheiden, ob sie ihre t:slim X2 mit dem G7 oder G6 von Dexcom verbinden möchten, um ihre Messwerte der Geweblglukose zu erhalten. Beide CGM-Systeme sind separat bei Dexcom erhältlich.

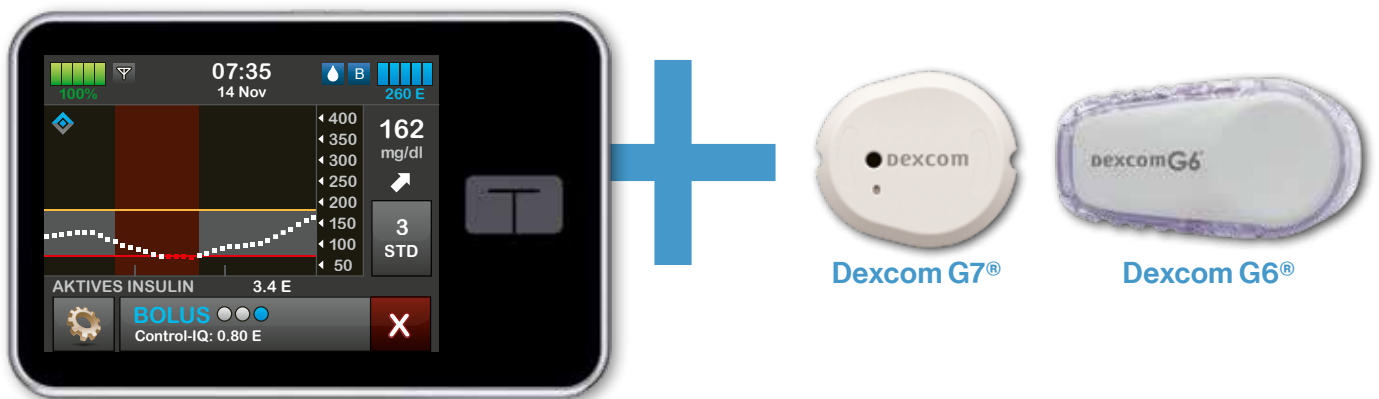

Originalgröße

Aktualisierungen der Control-IQ[™] Technologie

Timer für „Bewegung“

Sie können nun einen Timer auf eine bestimmte Trainingsdauer einstellen, sodass Sie nicht mehr daran denken müssen, wann Sie die Aktivität nach dem Sport beenden müssen. Sie können den Timer zwischen 30 Minuten und 8 Stunden einstellen.



Übergang von Aktivitäten

Sie müssen eine begonnene Aktivität nicht mehr stoppen, bevor Sie zu einer anderen Aktivität wechseln können. Wenn zum Beispiel „Schlaf“ aktiv ist, können Sie mit Sport beginnen, indem Sie einfach auf „Bewegung“ tippen. Dabei müssen Sie „Schlaf“ nicht manuell stoppen, bevor Sie auf „Bewegung“ tippen.



Pumpentöne

Die bestehenden Töne für Pumpen-Alarmer, Fehlfunktionen und Warnungen werden beibehalten. Die Benachrichtigung für Erinnerungen hat jetzt einen neuen Ton.



Priorität	Ton	Ereignis
Hoch	3 Folgen von 3 Signaltönen	Pumpen-Alarme und Fehlfunktionen
Mittel	2 Folgen von 3 Signaltönen	Pumpen-Warnungen, die die Insulinabgabe beeinflussen
Niedrig	1 Folge von 3 Signaltönen	Pumpen-Warnungen ohne Einfluss auf die Insulinabgabe
(NEU) Zur Information	2 kurze Signaltöne	Benachrichtigungen zur Information (Erinnerungen)

Sensor läuft bald ab

Ihre Pumpe zeigt Ihnen an, wie viel Zeit Sie noch bis zum Abschluss der Sensorsitzung zur kontinuierlichen Glukosemessung haben. Der Bildschirm „Sensor läuft bald ab“ wird nun bei 24 statt bei 6 verbleibenden Stunden angezeigt. Es wird auch angezeigt, wenn noch 2 Stunden und 30 Minuten verbleiben, bevor Ihre Sitzung endet.

Die bestehenden Töne für Pumpen-Alarme, Fehlfunktionen und Warnungen werden beibehalten. Die Benachrichtigung für Erinnerungen hat jetzt einen neuen Ton.



Alarm „Auto-Abschaltung“

Ihre Pumpe kann die Insulinabgabe unterbrechen und Sie warnen, wenn es innerhalb einer bestimmten Zeitspanne keinen Kontakt mit der Pumpe gegeben hat. Standardmäßig ist dieser Alarm jetzt auf „Aus“ voreingestellt.

Die Aktualisierung Ihrer derzeitigen Pumpe ändert nichts an ihrer bestehenden Einstellung. Sie können diese weiterhin zwischen 5 und 24 Stunden oder auf „Aus“ stellen.

Ob Sie die Auto-Abschaltung nutzen, besprechen Sie bitte mit Ihrer verantwortlichen Ärztin/Ihrem verantwortlichen Arzt.



Haben Sie noch Fragen zum Update?

Sollten Sie noch Informationen rund um das Update benötigen, haben wir Ihnen hier eine Liste an Fragen & Antworten zusammengestellt vitalaire-diabetes.de/faq.

Unser Team steht Ihnen ebenfalls beratend zur Seite. Sie erreichen uns unter:

0800/100 16 44

(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz, Geschäftszeiten von 8–17 Uhr, Notdienst von 17–8 Uhr).



Verantwortungsvolle Nutzung der Control-IQ Technologie

Auch mit fortschrittlichen Systemen wie der t:slim X2 Insulinpumpe mit Control-IQ Technologie sind Sie weiterhin für das aktive Management Ihres Diabetes verantwortlich. Die Control-IQ Technologie kann nicht jedes Auftreten von hohem oder niedrigem Blutzucker verhindern. Das System wurde entwickelt, um Glukoseschwankungen zu verringern, erfordert jedoch eine genaue Eingabe von Informationen Ihrerseits, beispielsweise Mahlzeiten, Schlaf- oder Sportzeiten. Die Control-IQ Technologie funktioniert nur dann wie vorgesehen, wenn Sie alle Systemkomponenten, einschließlich CGM, Infusionsset und Reservoir, gemäß der Anleitung verwenden. Ohne CGM-Messwerte kann Ihre Pumpe die Insulinverabreichung nicht anpassen. Da es Situationen und Notfälle gibt, die das System möglicherweise nicht identifizieren oder auf die es nicht reagieren kann, achten Sie stets auf Ihre Symptome und folgen Sie den Empfehlungen Ihres Arztes/Ihrer Ärztin.

Achtung: Die Control-IQ Technologie darf nicht bei Personen verwendet werden, die unter sechs Jahre alt sind, weniger als 10 Insulineinheiten täglich benötigen, unter 25 kg wiegen, schwanger, dialysepflichtig oder schwerkrank sind oder Hydroxyharnstoff einnehmen.

© 2023 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Tandem Diabetes Care, das Tandem-Logo, Control-IQ und t:slim X2 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Tandem Diabetes Care, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Dexcom, Dexcom G6 und Dexcom G7 sind entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke von Dexcom, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.